

UltraSept

Solução Multiuso PARA LENTES DE CONTATO *Gelatinosas, Silicone Hidrogel e Rígida Gás Permeável (RGP)*

DESCRIÇÃO

UltraSept tem ação de limpar, desinfetar, enxaguar, lubrificar e conservar as lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas), de silicone hidrogel e rígida gás-permeável (RGP) sem irritar os olhos.

UltraSept proporciona um conforto prolongado durante todo o dia, mesmo para olhos sensíveis. Umidifica as lentes e alivia pequenas irritações e o desconforto durante o uso das lentes. É indicado para desinfetar, limpar, enxaguar, lubrificar e conservar lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas) e silicone hidrogel.

O produto também é compatível para a utilização em lentes rígidas.

COMPOSIÇÃO

Cloreto de sódio, fosfato de sódio dibásico dodecaidratado, fosfato de sódio monobásico monohidratado, citrato de sódio, glucose etoxilada, cloridrato de polihexametileno biguanida, edetato dissódico di-hidratado, hipromelose, polissorbato, poloxâmer e água purificada.

INDICAÇÕES

UltraSept é indicado para desinfecção, limpeza diária, remoção de proteínas, lubrificação, enxágue e armazenamento de todas as lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas), de silicone hidrogel e rígida gás-permeável (RGP).

INSTRUÇÕES PARA LIMPAR, DESINFETAR E REMOVER PROTEÍNAS

1º passo - As mãos

Sempre lavar e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato.

2º passo - Limpeza e fricção

Acomode a lente na palma da mão. Enxágue completamente os dois lados da lente com **UltraSept**, e, com o dedo indicador da outra mão, fricção-a cuidadosamente de maneira linear (para frente e para trás e também para ambos os lados, em forma de cruz). Este procedimento deverá ser efetuado em ambos os lados da lente. Evite tocar a lente com a unha a fim de evitar a possibilidade de rasgos ou danos à mesma.

3º passo - Enxágue, desinfecção e conservação

Coloque as lentes limpas no estojo e encha-o com **UltraSept**. Deixe as lentes imersas durante, no mínimo, quatro (4) horas. A solução utilizada para desinfecção e acondicionamento deverá ser descartada diariamente. Para reutilizar as lentes, retire-as do estojo, repita o 1º passo e coloque-as nos olhos. Não é necessário enxaguar-las antes da utilização.

4º passo - Cuidados com o estojo

a) Quando utilizar um novo estojo para lentes, enxaguar-lo com **UltraSept** antes de usá-lo, para eliminar qualquer resíduo.

b) Após o uso, sempre esvaziar o estojo para lentes, e enxaguar-lo com **UltraSept**.

c) Enxágue bem o estojo a ser utilizado para o armazenamento das lentes com **UltraSept** e encha-o com esta solução após completar o enxágue.

d) A cavidade do estojo deve permanecer com solução abaixo de sua borda para evitar que a lente, ao flutuar, seja danificada pela tampa do estojo.

e) Seu especialista pode recomendar produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de suas lentes com base na química de suas lágrimas e seu horário de uso das lentes.

ADVERTÊNCIAS

Siga rigorosamente as instruções de seu especialista e todas as instruções de uso deste produto para o uso e conservação corretos de suas lentes de contato, e dos acessórios que se usam para seu cuidado, incluindo o estojo. Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retire **IMEDIATAMENTE** as lentes e consulte seu oftalmologista.

PRECAUÇÕES

- a) Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo.
- b) Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado.
- c) Respeitar a data de validade marcada no produto. Manter fora do alcance das crianças. Não usar para desinfecção térmica.
- d) Descartar o restante da solução após quatro meses da abertura do frasco.
- e) Para evitar contaminação do produto não tocar a superfície do conta-gotas.
- f) Sempre usar uma solução nova de Ultrasept. Não reutilizar a solução do seu estojo para lentes.
- g) Não usar esta solução se for alérgico a qualquer um dos componentes do Ultrasept.
- h) As lentes podem ser armazenadas em um estojo fechado por período máximo de 30 dias. Se você precisar armazenar suas lentes por um período mais longo de tempo, limpe-as e desinfete-as com Ultrasept cada vez que for usá-las. Importante: Se ocorrer irritação ou lacrimejamento excessivo e este sintomas persistirem ou se agravarem, ou ainda, se sua visão ficar embaçada, interrompa o uso da solução e procure um especialista.

CONTRAINDICAÇÕES

Ultrasept é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

APRESENTAÇÕES

Ultrasept é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 30 mL, 60 mL, 120 mL, 300 mL, 355 mL, 360 mL, 380 mL e 400 mL. Embalagem com ou sem estojo para lentes.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C. O produto deve ser protegido

da luz solar e não deve ser congelado.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após data de fabricação.

PRODUTO ESTÉRIL (por filtração)

NÃO USAR SE A EMBALAGEM ESTIVER ROMPIDA OU DESTAMPADA.

Fabricado por:

LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439 | Distrito Industrial

Porto Alegre | RS | Brasil | CEP 91790-005

Fone/Fax: +55 51 3250.8256

E-mail: lebon@laboratoriolebon.com.br

Site: www.laboratoriolebon.com.br

CNPJ: 87.375.952/0001-78

Resp. Técnica: Patrícia Schütz Bittencourt | CRF-RS 14228

Registro ANVISA/MS: 80256510010

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Distribuição e Comercialização:

KLEY HERTZ FARMACÊUTICA S.A.

Rua Comendador Azevedo, 224 | Bairro Floresta

Porto Alegre | RS | Brasil | CEP 90220-150

CNPJ: 92.695.691/0001-03

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Serviço de Atendimento

0800 642 9109

sac@laboratoriolebon.com.br