

OptoCare

SOLUÇÃO MULTIUSO

Olhos Sensíveis

Lentes de Contato Gelatinosas (hidrofílicas) e Silicóne Hidrogel

DESCRIÇÃO

Optocare Solução Multiuso tem ação de limpar, desinfetar, enxaguar, lubrificar e conservar as lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas) e de silicóne hidrogel sem irritar os olhos.

Optocare Solução Multiuso proporciona conforto prolongado durante todo o dia, mesmo para olhos sensíveis. Umidifica as lentes e alivia pequenas irritações e o desconforto causado durante o uso das lentes. É indicado para desinfetar, limpar, enxaguar, lubrificar e conservar lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas) e de silicóne hidrogel.

COMPOSIÇÃO

Ácido hialurônico (hialuronato de sódio), glicerina bi-distilada, sorbitol, poloxâmer 407, ácido bórico, cloreto de sódio, citrato de sódio (anidro), edetato dissódico di-hidratado, cloridrato de polihexametileno-biguanida, água purificada. Pode conter aminoetilpropanol e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH.

INDICAÇÕES

Optocare Solução Multiuso é indicada para limpeza, desinfecção, enxágue, lubrificação, conservação diária e armazenamento de todas as lentes de contato hidrofílicas gelatinosas (hidrofílicas) e de silicóne hidrogel.

INSTRUÇÕES PARA USO

1º passo - As mãos

Sempre lavar com água e sabão e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato e o frasco de **Optocare Solução Multiuso**.

2º passo - Limpeza e fricção

Acomode a lente na palma da mão. Enxágue completamente os dois lados da lente com **Optocare Solução Multiuso** e, com o dedo indicador da outra

mão, fricção-a cuidadosamente de maneira linear (para frente e para trás e também para ambos os lados, em forma de cruz). Este procedimento deverá ser efetuado em ambos os lados da lente. Evite tocar a lente com a unha a fim de evitar a possibilidade de rasgos ou danos à mesma. Enxaguar a lente com **Optocare Solução Multiuso** antes de acondicioná-la no estojo.

3º passo - Enxágue, desinfecção e conservação

Coloque as lentes limpas no estojo previamente limpo, sem resíduos, e encha-o com **Optocare Solução Multiuso**. Deixe as lentes imersas durante, no mínimo, quatro (4) horas. A solução utilizada para desinfecção e acondicionamento deverá ser descartada diariamente. Para reutilizar as lentes, retire-as do estojo, repita o 1º passo e enxágue-as antes de colocá-las nos olhos.

4º passo - Cuidados com o estojo

a) Quando utilizar um novo estojo para lentes, enxágua-lo com **Optocare Solução Multiuso** antes de usá-lo, para eliminar qualquer resíduo.

b) Após o uso, sempre esvaziar o estojo para lentes, e enxágua-lo com **Optocare Solução Multiuso**.

c) Enxágue bem o estojo a ser utilizado para o armazenamento das lentes com **Optocare Solução Multiuso** e encha-o com esta solução após completar o enxágue.

d) A cavidade do estojo deve permanecer com solução abaixo de sua borda para evitar que a lente, ao flutuar, saia do estojo ou seja danificada pela tampa do mesmo.

e) Seu especialista pode recomendar produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de suas lentes com base na química de suas lágrimas e seu programa de uso das lentes.



CIANO



MAGENTA



REFLEX BLUE C

ADVERTÊNCIAS

Siga rigorosamente as instruções de seu especialista e todas as instruções de uso deste produto para a correta conservação de suas lentes de contato, bem como dos acessórios envolvidos em seu cuidado, incluindo o estojo. Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, irritação, ardência, vermelhidão, lacrimejamento excessivo ou distúrbios na visão, descontinue imediatamente o uso da solução, retire as lentes e consulte o seu oftalmologista. Os cuidados com as lentes devem ser de acordo com orientação do médico oftalmologista.

PRECAUÇÕES

- a) Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo.
- b) Para evitar contaminação do produto não tocar a superfície do conta-gotas.
- c) Quando não estiver sendo utilizado, manter o frasco limpo, sem resíduos de produto na parte externa, e bem fechado.
- d) Respeitar a data de validade marcada no produto.
- e) Descartar o restante da solução após três meses da abertura do frasco.
- f) Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- g) Não usar para desinfecção térmica.
- h) Sempre usar uma solução nova de Optocare Solução Multiuso. Não reutilizar a do seu estojo para lentes.
- i) Não usar esta solução se for alérgico a qualquer um dos componentes de Optocare Solução Multiuso. Como qualquer produto para saúde, descontinuar o uso em caso de alergia a quaisquer dos componentes da fórmula.
- j) As lentes podem ser armazenadas em um estojo fechado por um período máximo de 30 dias. Se você precisar armazenar suas lentes por um período mais longo de tempo, limpe-as da forma recomendada e desinfete-as com Optocare Solução Multiuso cada vez que for usá-las.

Importante: Se ocorrer qualquer desconforto, irritação, ardência, vermelhidão, lacrimejamento excessivo ou distúrbios na visão, descontinue imediatamente o uso da solução e das lentes de contato e procure seu oftalmologista.

CONTRAINDICAÇÕES

Optocare Solução Multiuso é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula. Como qualquer produto para saúde, descontinuar o uso em caso de alergia a quaisquer dos componentes da fórmula.

APRESENTAÇÕES

Optocare Solução Multiuso é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 120 mL e 360 mL.

PRODUTO ESTÉRIL (por filtração)

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C. O produto deve ser protegido da luz solar e não deve ser congelado.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use o produto com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Após aberto, válido por 3 meses, caso mantido em condições de temperatura, umidade e limpeza adequadas.

Características físicas e organolépticas do produto: Optocare Solução Multiuso é uma solução límpida, incolor a levemente amarelada.

Antes de usar, observe o aspecto do produto. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Mantenha fora do alcance das crianças.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após data de fabricação. Após aberto, válido por 3 meses, caso mantido em condições de temperatura, umidade e limpeza adequadas.

PRODUTO ESTÉRIL (por filtração)

NÃO USAR SE A EMBALAGEM ESTIVER ROMPIDA OU DESTAMPADA.

Fabricado por:

LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA.

Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439 | Distrito Industrial
Porto Alegre | RS | Brasil | CEP 91 790-005
Fone +55 51 3250.8256
CNPJ: 87.375.952/0001-78
Resp. Técnica: Patrícia Schütz Bittencourt
CRF-RS 14228
Registro ANVISA/MS: 80256510013
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Distribuição e Comercialização:

KLEY HERTZ FARMACÊUTICA S.A.

Rua Comendador Azevedo, 224 | Bairro Floresta
Porto Alegre | RS | Brasil | CEP 90220-150
CNPJ: 92.695.691/0001-03
INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 642 9109

sac@laboratoriolebon.com.br