

Ultra Sept RGP

**Solução Multiuso
Para Lentes de Contato**

Rígidas Gás Permeáveis (RGP)

DESCRIÇÃO

A solução multiuso **Ultrasept RGP** tem ação de limpar, desinfetar, remover acúmulos de proteínas e outros depósitos da superfície, enxaguar e conservar lentes de contato, para uso diário em lentes RGP (Rígida Gás Permeável) e semanal em lentes gelatinosas (hidrofilicas) e de silicone hidrogel. Além disso, elimina micro-organismos prejudiciais da superfície da lente; proporcionando uma limpeza profunda eliminando todos os depósitos da superfície das lentes. **Ultrasept RGP** é compatível com todos os tipos de lentes RGP (Rígida Gás Permeável), gelatinosas (hidrofilicas) e silicone hidrogel. Não contém tiomersal.

COMPOSIÇÃO

Solução isotônica, tamponada e estéril contendo fosfato de sódio dibásico dodecaidratado, fosfato de sódio monobásico monoidratado, cloreto de sódio, edetato dissódico dihidratado, citrato de sódio, polissorbato 20, poloxâmer 407, cocoamidopropilbetaina, cloridrato de polihexametileno biguanida (PHMB), digliconato de doxexidina, methyl gluceth-20, água purificada.

Pode conter hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH.

INDICAÇÕES

A solução multiuso **Ultrasept RGP** é uma solução isotônica, tamponada e estéril, indicada para limpeza profunda, desinfecção, remoção de proteínas e outros depósitos, enxágue e conservação diárias de lentes de contato RGP (Rígidas Gás Permeáveis). Pode ser utilizada para limpeza profunda semanal, desinfecção e remoção de proteínas de lentes de contato gelatinosas (hidrofilicas) e de silicone hidrogel.

INSTRUÇÕES PARA USO

1º passo - As mãos: Sempre lavar com água e sabão e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato e o frasco de **Ultrasept RGP**.

2º passo - Limpeza e fricção: Acomode a lente na palma da mão. Enxágue completamente os dois lados da lente com **Ultrasept RGP** e, com o dedo indicador da outra mão, fricione-a cuidadosamente de maneira linear (para frente e para trás e também para ambos os lados, em forma de cruz). Este procedimento deverá ser efetuado em ambos os lados da lente. Evite tocar a lente com a unha a fim de evitar a possibilidade de rasgos, quebra ou danos à mesma. Enxaguar a lente com **Ultrasept RGP** antes de acondicioná-la no estojo.

3º passo - Enxágue, desinfecção e conservação: Coloque as lentes limpas no estojo previamente limpo, sem resíduos, e encha-o com **Ultrasept RGP**. Deixe as lentes imersas durante, no mínimo, quatro (4) horas. A solução utilizada para desinfecção e acondicionamento deverá ser descartada diariamente. Para reutilizar as lentes, retire-as do estojo, repita o 1º passo e enxágue-as antes de colocá-las nos olhos.

4º passo - Cuidados com o estojo:

- Quando utilizar um novo estojo para lentes, enxaguá-lo com **Ultrasept RGP** antes do uso, para eliminar qualquer resíduo.
- Após o uso, sempre esvaziar o estojo para lentes, e enxaguá-lo com **Ultrasept RGP**.
- Enxágue bem o estojo a ser utilizado para o armazenamento das lentes com **Ultrasept RGP** e encha-o com esta solução após completar o enxágue.
- A cavidade do estojo deve permanecer com solução abaixo de sua borda para evitar que a lente, ao flutuar, saia do estojo ou seja danificada pela tampa do mesmo.
- Seu especialista pode recomendar produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de suas lentes com base na composição química de suas lágrimas e seu programa de uso das lentes.

ADVERTÊNCIAS

Siga rigorosamente as instruções de seu especialista e todas as instruções de uso deste produto para a correta conservação de suas lentes de contato, bem como dos acessórios envolvidos em seu cuidado, incluindo o estojo. Se você sentir desconforto persistente nos olhos, irritação, ardência, vermelhidão, lacrimejamento excessivo ou distúrbios na visão, descontinue imediatamente o uso da solução, retire as lentes e consulte seu oftalmologista. Os cuidados com as lentes devem ser de acordo com a orientação do médico oftalmologista.

PRECAUÇÕES

- a) Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo.
- b) Para evitar contaminação do produto não tocar a superfície do conta-gotas.
- c) Quando não estiver sendo utilizado, manter o frasco limpo, sem resíduos de produto na parte externa, e bem fechado.
- d) Respeitar a data de validade marcada no produto.
- e) Descartar o restante da solução após 4 meses da abertura do frasco.
- f) Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- g) Não usar para desinfecção térmica.
- h) Sempre usar uma solução nova de **Ultrasept RGP**. Não reutilizar a solução do seu estoque para lentes.
- i) Não usar esta solução se for alérgico a qualquer um dos componentes do **Ultrasept RGP**. Como qualquer produto para saúde, descontinuar o uso em caso de alergia a quaisquer dos componentes da fórmula.
- j) As lentes podem ser armazenadas em um estoque fechado por período máximo de 30 dias. Se você precisar armazenar suas lentes por um período mais longo de tempo, limpe-as e desinfete-as com **Ultrasept RGP** a cada vez que for usá-las.

Importante: Se ocorrer qualquer desconforto, irritação, ardência, vermelhidão, lacrimejamento excessivo ou distúrbios na visão, descontinue imediatamente o uso da solução e das lentes de contato e procure seu oftalmologista.

CONTRAINDICAÇÕES

Ultrasept RGP é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula. Como qualquer produto para saúde, descontinuar o uso em caso de alergia a quaisquer dos componentes da fórmula.

APRESENTAÇÃO

Ultrasept RGP é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 120 mL. PRODUTO ESTÉRIL (por filtração).

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C. O produto deve ser protegido da luz solar e não deve ser congelado.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use o produto com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Após aberto, válido por 4 meses, caso mantido em condições de temperatura, umidade e limpeza adequadas.

Características físicas e organolépticas do produto:

Ultrasept RGP é uma solução límpida, incolor a levemente amarelada.

Antes de usar, observe o aspecto do produto. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Mantenha fora do alcance das crianças.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após data de fabricação.

Após aberto, válido por 4 meses, caso mantido em condições de temperatura, umidade e limpeza adequadas.

PRODUTO ESTÉRIL (por filtração)

NÃO USAR SE A EMBALAGEM ESTIVER ROMPIDA OU DESTAMPADA

Fabricado por:

LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439 | Distrito Industrial

Porto Alegre | RS | Brasil | CEP 91790-005

CNPJ: 87.375.952/0001-78

Fone/Fax: +55 51 3250.8256

E-mail: lebon@laboratoriolebon.com.br

Site: www.laboratoriolebon.com.br

Responsável Técnica: Patrícia Schütz Bittencourt

CRF/RS: 14228

Registro ANVISA/MS: 80256510012

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Distribuição e Comercialização:

KLEY HERTZ FARMACÊUTICA S.A.

Rua Comendador Azevedo, 224

Bairro Floresta | Porto Alegre | RS

CEP 90220-150 | Brasil

CNPJ: 92.695.691/0001-03

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Serviço de Atendimento

0800 642 9109

sac@laboratoriolebon.com.br



130320

20209