

# VagiSoft®

## GEL HIDRATANTE INTRAVAGINAL

### APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 bisnaga de 30g + 10 aplicadores descartáveis.

### USO ADULTO

### USO VAGINAL

### INFORMAÇÕES

#### O que é Vagisoft?

Vagisoft é um hidratante intravaginal na forma de gel, indicado para mulheres com sintomas de ressecamento vaginal. O produto proporciona melhora dos sintomas, restaurando a umidade desta região. Recomenda-se que o produto seja aplicado uma única vez a cada 2 ou 3 dias por até 24 dias, ou conforme orientação médica.

#### Quando Vagisoft é contraindicado?

Não é recomendado o uso do produto por mulheres grávidas e em mulheres em período de lactação.

#### Qual o princípio de funcionamento de Vagisoft?

Vagisoft é um hidratante intravaginal, que proporciona umidade (hidratação) por até três dias. Recomenda-se que o produto seja aplicado uma única vez a cada 2 ou 3 dias por até 24 dias, ou conforme orientação médica.

O produto consiste em um gel hidratante intravaginal, que proporciona umidade (hidratação) quando utilizado regularmente, restabelecendo a umidade natural. Possui em sua composição o insumo Ácido poliacrílico, que consiste em um polímero formado por ligações cruzadas entre o ácido acrílico e divinil glicol. Este material apresenta notável propriedade bioadesiva sendo amplamente utilizado em géis intravaginais devido à sua propriedade hidratante. Segundo a literatura, isso ocorre porque, devido a sua propriedade bioadesiva, esse polímero se adere à mucosa vaginal até o "turnover" celular, cuja duração é de aproximadamente 3 a 5 dias. Além disso, como tal substância apresenta natureza de polieletrólito e notável capacidade tamponante, o Ácido poliacrílico altera o nível de hidratação local do tecido, reestabelecendo a umidade e mantendo o pH vaginal dentro da faixa fisiológica.

#### Quais as vantagens do uso de Vagisoft?

Vagisoft não contém hormônios.

Vagisoft é um hidratante intravaginal, que proporciona umidade (hidratação) por até três dias.

Vagisoft restaura a umidade vaginal e fará com que a relação sexual seja mais confortável.

Vagisoft não contém fragrância, não possui sabor e não é agressivo.

Ginecologicamente testado.

2415 C

655 C

105 x 140 mm

### **Quem pode usar Vagisoft?**

Mulheres que necessitam de hidratação vaginal.

### **Qual a composição de Vagisoft?**

**Vagisoft** é composto por: ácido poliacrílico, carbômer, glicerol, metilparabeno, propilparabeno, fosfato de sódio monobásico, fosfato de sódio dibásico, hidróxido de sódio, água purificada.

### **Como utilizar Vagisoft?**

Recomenda-se que o produto seja aplicado uma única vez a cada 2 ou 3 dias por até 24 dias, ou conforme orientação médica.

- 1 – Retire a tampa da bisnaga;
- 2 – Perfure o lacre da bisnaga com o fundo da tampa;
- 3 – Adapte o aplicador e aperte suavemente a bisnaga até que o êmbolo chegue ao topo, enchendo-o;
- 4 – Retire o aplicador e feche novamente a bisnaga;
- 5 – Introduza profundamente o aplicador que contém o produto, na vagina, preferencialmente na posição deitada, elevando-se as pernas. Transferir todo o conteúdo do aplicador na vagina. Após usar o aplicador, deve-se descartá-lo.



### **Como sei que estou utilizando a quantidade correta de Vagisoft?**

**Vagisoft** contém a quantidade exata a ser aplicada, pois o aplicador de **Vagisoft** foi desenvolvido para depositar a quantidade recomendada do produto.

### **Quais as precauções e advertências para utilização de Vagisoft?**

#### **MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

Somente para uso vaginal.

Se ocorrer irritação, interrompa o uso. Se persistirem os sintomas, contate seu médico.

Não é recomendado o uso no período menstrual.

**Não utilize o produto se a embalagem estiver violada.**

Não utilizar após a data da expiração impressa na embalagem.

Utilizar sob supervisão médica.

### **Como Vagisoft deve ser armazenado?**

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, ao abrigo da luz e umidade. Após aberto, válido por 2 meses.

SAC 0800 7049001 – [www.hertzfarma.com.br](http://www.hertzfarma.com.br)

Fabricante: Kley Hertz Farmacêutica S.A.

Rua Comendador Azevedo, 224 – Porto Alegre – RS

Farmacêutico Responsável: Lilliane Bolfe – CRF-RS 18344

Reg. ANVISA/MS.: 80496919001 – C.N.P.J.: 92.695.691/0001-03 – Indústria Brasileira

